

Zerinol Virus Defense

ZENTIVA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Zerinol Virus Defense è uno spray orale indicato contro il raffreddore. È facile da usare e ha una rapida azione.

Zerinol Virus Defense crea una barriera protettiva contro i virus del raffreddore rivestendo la mucosa della cavità orale. La barriera intrappola i virus del raffreddore, li disattiva e li inibisce dal diffondersi e moltiplicarsi.

DESTINAZIONE D'USO

Tratta e allevia il raffreddore.

PRECAUZIONI

- Non usare Zerinol Virus Defense se si è ipersensibili/allergici a uno qualsiasi degli ingredienti.
- Non utilizzare il prodotto durante la gravidanza e l'allattamento, in quanto non sono disponibili informazioni cliniche.
- Non utilizzare il prodotto dopo un intervento chirurgico alla bocca e/o alla gola fino alla guarigione della ferita, senza consultare un medico.
- Non inalare quando si applica lo spray poiché può causare irritazione delle vie aeree, provocando tosse e raucedine.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini, per evitare incidenti con le piccole parti.
- Consultare un medico se si ha la febbre alta o se i sintomi sono più gravi di quelli di un normale raffreddore; potrebbero essere dovuti ad altre cause.
- Per evitare la diffusione di malattie, il prodotto deve essere utilizzato da una sola persona.
- Per un effetto ottimale, evitare di mangiare o bere nei 20 minuti successivi all'utilizzo.
- Non utilizzare se la confezione è danneggiata o aperta.

INDICAZIONE

Da usare in caso di esposizione ai virus del raffreddore o alla comparsa dei primi sintomi del raffreddore. Zerinol Virus Defense è adatto per adulti e bambini sopra i 4 anni.

CONTROINDICAZIONI

Non sono note controindicazioni.

POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Non sono noti effetti collaterali.

Se dovessero verificarsi effetti indesiderati durante l'uso di Zerinol Virus Defense, consultare un medico.

BENEFICI CLINICI

- Zerinol Virus Defense protegge dai virus del raffreddore.
 - Zerinol Virus Defense riduce la durata del raffreddore se usato nella fase iniziale dell'infezione.
 - Zerinol Virus Defense allevia i sintomi del raffreddore e calma il mal di gola.
 - Zerinol Virus Defense può ridurre il numero dei giorni di malattia fino al 54%¹ o fino a 3,5 giorni.^{1,2}
- 1) Clarsund M, et al. (2017) A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Clinical Study on ColdZyme® Mouth Spray against Rhinovirus-Induced Common Cold. *Open Journal of Respiratory Diseases*, 7, 125-135.
- 2) Glen Davison, Eleanor Perkins, Arwel W Jones, Gabriella M Swart, Alex R Jenkins, Hayley Robinson & Kimberly Dargan (2020) Coldzyme® Mouth Spray reduces duration of upper respiratory tract infection symptoms in endurance athletes under free living conditions, *European Journal of Sport Science*.


ISTRUZIONI PER L'USO

Quando usare

Iniziare ad utilizzare Zerinol Virus Defense appena possibile dopo la comparsa dei primi sintomi del raffreddore o la possibile esposizione ai virus del raffreddore, per esempio: luoghi affollati dove il rischio di infezione è più alto. Continuare a usare Zerinol Virus Defense fino al miglioramento dei sintomi o alla conclusione dell'esposizione.

Come usare

1. Aprire la bocca e puntare l'ugello verso la gola (Figura 1).
2. Premere verso il basso la testina dello spray e spruzzare 2 volte (1 dose) ogni 2 ore fino a 6 volte al giorno per tutto il tempo in cui si è esposti al virus o fino al miglioramento dei sintomi.

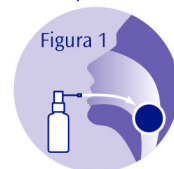

COME FUNZIONA

Zerinol Virus Defense è composto da due ingredienti principali, glicerolo e tripsina (di merluzzo), che insieme forniscono una barriera efficace che agisce in tre modi:

1. **Intrappola:** Il glicerolo crea una barriera transitoria osmoticamente attiva che intrappola i virus.
2. **Disattiva:** La tripsina inibisce la capacità dei virus di legarsi, disattivandone la capacità di infettare le cellule.
3. **Protegge:** La barriera creata da Zerinol Virus Defense protegge la cavità orale e la gola.

EFFICACIA CLINICAMENTE TESTATA



INTRAPPOLA



DISATTIVA



PROTEGGE

DESCRIZIONE DELLA MALATTIA: IL RAFFREDDORE

Le infezioni virali delle vie respiratorie superiori, molte delle quali sono anche conosciute come comune raffreddore, rientrano tra le infezioni più comuni nell'uomo. Molti virus sono stati associati al comune raffreddore, di cui il rinovirus è il più comune.³

Il periodo di incubazione di una malattia infettiva è il tempo che intercorre tra l'infezione e l'insorgenza dei sintomi. Il periodo di incubazione varia a seconda del tipo di virus, variando da mezza giornata a più di una settimana per alcuni virus.⁴

Il sistema immunitario reagisce ai virus del raffreddore attraverso una risposta infiammatoria. La reazione infiammatoria provoca sintomi come mal di gola, tosse, naso che cola e talvolta febbre e starnuti.

- Il raffreddore solitamente dura dai 7 ai 10 giorni.⁵
- L'adulto solitamente ha dai 2 ai 5 raffreddori all'anno.⁶
- Il bambino solitamente ha dai 7 ai 10 raffreddori all'anno.⁶

3 Wat D. The common cold: a review of the literature. *European Journal of Internal Medicine*, 2004 Apr;15(2):79-88.

4 Lessler J et al. Incubation periods of acute respiratory viral infections: a systematic review. *Lancet Infectious Diseases*, 2009 May;9(5):291-300

5 Heikkinen T, Järvinen A. The common cold. *Lancet*, 2003 Jan 4;361(9351): 51-9.

6 Hull D et al. Effects of creating a non-specific, virus-hostile environment in the nasopharynx on symptoms and duration of common cold.

Acta Otorhinolaryngol Ital. 2007 Apr; 27(2): 73-7.

LA CONFEZIONE ZERINOL VIRUS DEFENSE CONTIENE

- Spray orale composto da flacone, testina dello spray, ugello e cappuccio protettivo.
- Zerinol Virus Defense contiene glicerolo, acqua, un enzima naturale – tripsina (di merluzzo), etanolo (<1 %), cloruro di calcio, trometamolo e mentolo. La soluzione è senza zucchero e non contiene conservanti, glutine o lattosio.
- Istruzioni per l'uso.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

- Utilizzare prima della data di scadenza indicata sull'etichetta e sulla confezione del prodotto.
- Conservare a temperatura pari o inferiore a 25°C.
- Aiutaci a proteggere l'ambiente riciclando il prodotto non utilizzato ed i rifiuti derivanti in conformità alla normativa locale vigente.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI



Consultare le istruzioni per l'uso



Limite superiore di temperatura



Data di scadenza



Numero di lotto



Numero di catalogo



Fabbricante



Attenzione, consultare le istruzioni per l'uso



Non utilizzare se la confezione è danneggiata



PRODOTTO DA
Enzymatica AB
IDEON Science Park,
SE-223 70 Lund, Svezia
info@enzymatica.com
enzymatica.com

Distributore
Zentiva Italia S.r.l.
Via P. Paleocapa, 7
20121 Milano

PROTEGGIAMO L'AMBIENTE	
RACCOLTA PLASTICA	RACCOLTA CARTA
Flacone: HDPE 2 Cappuccio: PP5 - LDPE 4	Astuccio: PAP 22 Foglietto: PAP 21
Verifica le disposizioni del tuo comune	

Data ultima revisione: Dicembre 2021

1065035906

Dispositivo medico



REF 101022

Zerinol Virus Defense
20 ml